

MATMATECH
540 Avenue René Ladreyt
59830 CYSOING

☎ (+33) 3 61 97 58 88
✉ contact@matmatech.com

Rapports d'incidents médicaux :
materiovigilance@matmatech.com

Les symboles utilisés :



Fabricant et année de fabrication



Dispositif médical



Dispositif médical fabriqué
conformément au règlement
européen 2017 / 745



Sans latex



Instructions d'utilisation



Numéro de lot



Dispositif à usage unique



Température de stockage et
d'utilisation



À éliminer selon la réglementation
en vigueur



Référence catalogue



À utiliser avant le :



GynWave 360[®]

Sonde vaginale



Sonde à usage unique
pour GynWave 360[®]
REF. V01 / V04

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI
Sonde usage unique V01 / V04
pour GynWave 360[®]

Référence : **V01 / V04**
Sonde vaginale pour GynWave 360[®],
usage unique



NOTICE UTILISATEUR

Sonde de radiofréquence (RF) non stérile

1 . Objectif visé

Il s'agit d'une sonde qui transfère le courant de radiofréquence sur la zone à traiter du patient et qui est utilisée à des fins électrothermiques.

2 . Indications

1/ Description complète du produit :


- Ce produit est une sonde RF non stérile qui est utilisée couplée au dispositif de radiofréquence **MATMATECH**. Il n'existe que des sondes à usage unique et de type monopolaire.

- Cette sonde RF non stérile est utilisée pour le produit **Gynwave 360**.

2/ Installation du produit :

- Connectez le connecteur de la sonde (rouge) au connecteur sur l'avant du générateur (rouge).

Visuel descriptif du produit

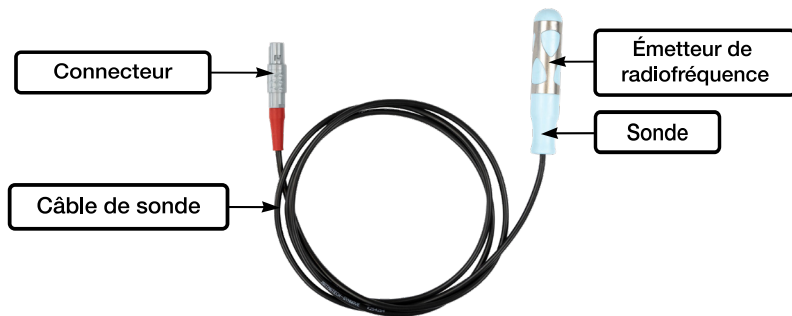

3 . Préparation avant utilisation

1/ Veuillez être bien informé sur l'utilisation des méthodes et des signes de sécurité en lisant le manuel avant l'utilisation.

2/ Vérifiez si l'emballage n'est pas endommagé.

3/ L'utilisateur doit utiliser des gants (stériles ou non).

4 . Mode d'emploi et fonctionnement

1/ Sortez le produit de son emballage, muni de gants stériles ou non.


2/ Connectez la sonde RF et les accessoires avec l'appareil.

3/ Démarrez le fonctionnement de l'appareil.

5 . Comment l'arrêter ?

1/ L'arrêt des opérations se fait :

- Seul, à la fin du décompte temps.
- En sélectionnant l'arrêt du traitement sur l'écran de contrôle.
- En relâchant la pression exercée sur la pédale.

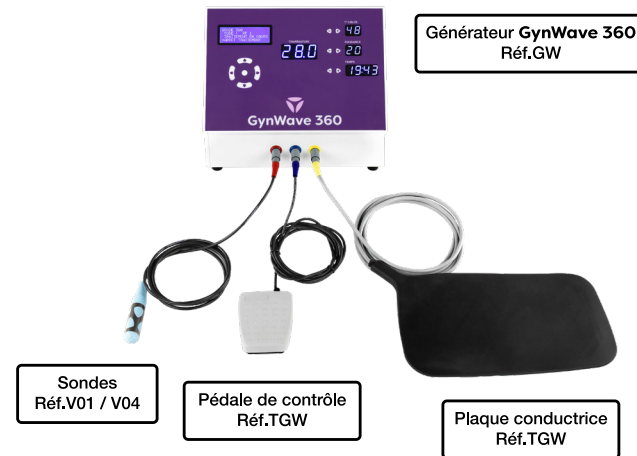

6 . Mises en garde

1/ Retirez le produit de son emballage juste avant de l'utiliser. Si la sonde est déconditionnée trop en amont, elle peut être contaminée et la patiente peut être infectée.

2/ Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un générateur de radiofréquence **MATMATECH** de type **Gynwave 360**.

3/ Ne pas modifier le produit.